

造影剤名	投与量	MRI装置
マグネスコープ	0.2mL/kg	PHILIPS Ingenia 3.0T

多発脳転移、SAH内頸動脈解離

撮像名	撮像方法	撮像断面	撮像時間	TE	TR	FA	ETL	Pararell	FS
3D TSE-FS	TSE	SG	5:46	37	400	90	10	4.8	+

撮像名	Mtx	FOV	位相方向	バンド幅	slice th	slice 枚数	iMSDE pulse
3D TSE-FS	268×268	256×256	AP	266.5	1.2	300	

SAH 前大脳動脈瘤

撮像名	撮像方法	撮像断面	撮像時間	TE	TR	FA	ETL	Pararell	FS
3D TSE-FS	TSE	SG	6:57	39	450	90	15	2	+

撮像名	Mtx	FOV	位相方向	バンド幅	slice th	slice 枚数	iMSDE pulse
3D TSE-FS	260×260	220×220	AP	269.3	1	85	